

歯科技工士が開発した  
はめて寝るだけで不快な音と、歯の損傷を防ぐ奥歯保護具

# 歯ぎしりくん<sup>®</sup> 1900

下の奥歯にはめるだけで、歯ぎしりや噛み締めめから  
あなたの大切な歯を守ります。

**睡眠時に装着するだけで、  
歯ぎしりや噛み締めめから、  
あなたの大切な歯を守ります。**

睡眠時、歯ぎしりくんを装着することで歯と  
歯が直接触れ合わず、歯ぎしり独特の「ざりギ  
リ」「キリキリ」という軌音を防ぎます。

また睡眠中の歯ぎしりや噛み締めめは、起きて  
いる時の約2倍もの力が歯や顎にかかり、歯を  
痛めるだけでなく、身体に様々な悪い影響を与  
えます。歯ぎしりくんが歯を保護しましょう。

**自分専用の歯ぎしりくんが  
簡単に作れます。**

歯ぎしりくんは、下の奥歯に装着し自分の歯  
型に成形するので、ぴったりフィットします。  
成形に失敗した場合は、お湯に浸すことで何度  
でも繰り返し成形し直すことができます。



日本製

特許取得済み商品

個装サイズ	W95 X H120 X D22mm
内箱サイズ	W125 X H98 X D120mm
梱包サイズ	W620 X H115 X D266mm
梱包入数	100 (10 X 10)

成形前




歯型のついていない  
歯ぎしりくん

お湯で柔らかくする




61~63°Cのお湯に歯ぎしりく  
んを浸し(約45秒)、柔らかく  
なったら取り出します。サー  
モメーターの先端部に引  
かけると安全に取り出せます。

歯型をつける

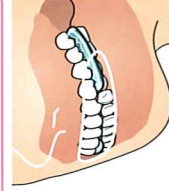

鏡を見ながら下の奥歯に装着  
し、しっかりと噛みしめます。  
噛み合わせの悪い場合は、お  
湯に入れると成形し直すこと  
ができます。

歯型の固定

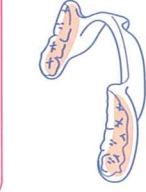

歯型がしっかりついたら、歯ぎ  
しりくんを外してください。  
温度が下がるにつれて自然に  
形が固定されます。

成形後



歯型のついた  
自分専用の歯ぎしりくん

**装着時の違和感をなくした極薄構造**

薄くコンパクトな構造とスムーズなラウンド処理を行った  
形状により、睡眠時の異物感を大幅に軽減しています。

**使い方は下の奥歯にはめるだけで簡単**

下の奥歯に装着するので、呼吸の妨げにもなりません。また  
舌の下に入りますので、睡眠中に飲み込むことはありません。

**耐久性、安全性にも自信があります**

噛む部分にエラストマを使用し、二層構造とする  
ことで耐久性を高めています。



歯ぎしりくんは消耗品ですので、2~3ヶ月を目途にお取り替えすることをおすす  
めします。(個人により、多少の違いがあります。)

歯科技工歴30年の  
経験を生かし開発しました



歯科技工士 吉田(信隆)

価格 **1,995円** (税込)  
(本体 1,900円)



●簡易ケース

●サーモメーター

●歯ぎしりくん本体

株式会社フクヤマ ヘルスケア事業部

〒130-0026 東京都墨田区両国4-34-15 TEL:03-3634-5781

<http://www.fuku-yama.co.jp>



4 529796 134844